


# 燈號說明與疑難排解



## 燈號顯示說明

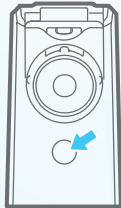


電源指示燈

|  |      |          |
|--|------|----------|
|  | 綠燈恆亮 | 正常運作     |
|  | 橘燈恆亮 | 低電量警示    |
|  | 橘燈閃爍 | 功能異常     |
|  | 不亮   | 無電力、功能異常 |



## 疑難排解

| 故障情形   | 可能造成原因       | 如何處理                   |
|--|--------------|------------------------|
|  霧化效果異常微弱                         | 電池電量低        | 更換新的電池                 |
|  | 電極有污漬        | 清潔電極上的污漬               |
|  | 微孔片很髒        | 進行藥杯清潔及消毒              |
|  | 微孔片破裂        | 更換新的藥杯                 |
|  按下開關後，<br>電源指示燈沒有亮，<br>且噴霧器沒有噴霧 | 電池的正負極性裝反    | 依電池極性重新安裝              |
|  | 電池沒電         | 更換新電池                  |
|  | 電池蓋未蓋緊       | 確保電池蓋完全關上              |
|  | 電源適配器未正確連接   | 確認並重新連接電源適配器           |
|  電源指示燈亮綠燈，<br>但是噴霧器沒有霧化         | 微孔片沒有完全浸泡到藥液 | 重新調整機器到垂直位置並確認微孔片有浸入藥物 |
|  | 藥杯未裝到足夠的藥液   | 確保藥杯已裝滿足夠的藥液           |
|  | 藥杯微孔片外側有藥液堆積 | 將藥杯外側藥液甩乾或用紙巾吸乾        |
|  | 微孔片很髒        | 進行藥杯清潔及消毒              |
|  | 微孔片破裂        | 更換新的藥杯                 |
|  電源指示燈常亮橘燈                      | 電池電量低        | 更換新的電池                 |
|  電源指示燈橘燈閃爍                      | 電極未接觸或短路     | 清潔電極並重新安裝藥杯            |
|  | 藥杯未正確安裝      | 重新安裝藥杯                 |